

## Software Update Vorbereitung plusoptiX A12C

Legen Sie eine SD-Karte mit mindestens 1 GB Speicherkapazität bereit.

Klicken Sie auf das neueste Software Update im Downloadbereich und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.


Sie benötigen folgende Anwendungen, um ein Software Update auf dem plusoptiX 12 durchzuführen: [Win32Diskimager](#) and [7Zip 32Bit](#) or [7Zip 64Bit](#).

### Kurzanleitung zur Erstellung einer Update-SD-Karte:


1. Entpacken Sie die heruntergeladene 7z-Datei mithilfe des Programms „7zip“. Sie erhalten eine Datei mit der Endung .img
2. Schließen Sie eine leere SD-Karte mit mindestens 1 GB Speicherplatz an. Sie wird in einem Laufwerk (z.B. F:) angezeigt.
3. Öffnen Sie die Datei mit “win32diskimager“ und wählen Sie die SD-Karte (F:) als Zielordner und fahren Sie fort.
4. Nachdem Sie die Datei auf die SD-Karte geladen haben, können Sie diese an einen ausgeschalteten plusoptiX 12 anschließen und das Gerät anschließend anschalten. Ihnen wird eine Meldung angezeigt, ob Sie das Software Update laden wollen. Bestätigen Sie diese Meldung.

## Anleitung zum Software Update plusoptiX A12C

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Schließen Sie das Gerät an die 12V Stromversorgung an.
3. Legen Sie die SD Karte mit den Kontakten nach oben ein.

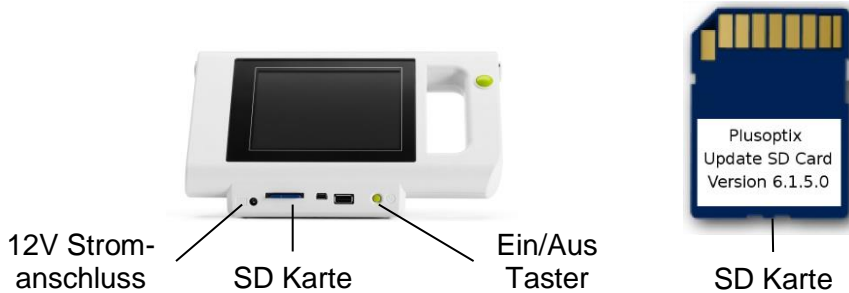

4. Schalten Sie das Gerät ein.
5. Warten Sie 30 Sekunden lang, bis folgende Nachricht auf dem Bildschirm erscheint:

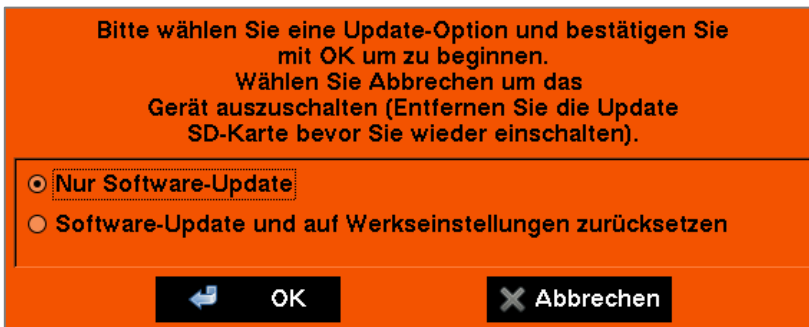

6. Berühren Sie "OK", um den „Update“ zu starten.
7. Es wird folgende Nachricht auf dem Bildschirm angezeigt:



8. Warten Sie (der Software Update kann 5 Minuten dauern) bis diese Nachricht auf dem Bildschirm erscheint:



9. Drücken Sie „Ja“ zur Formatierung der SD Karte oder „Nein“, um das Gerät ohne Formatierung abzuschalten. Entfernen Sie danach die SD Karte. Ohne Formatierung muss eine andere SD-Karte zur Speicherung der Messprotokolle eingesteckt werden.
10. Die Software ist nun auf dem neuesten Stand. Nach dem Einschalten des Geräts ist sie einsatzbereit.