

Trainingvideo-Upload vorbereiten

Bereiten Sie einen leeren USB-Stick vor.

Klicken Sie auf den Download-Link mit dem neuesten Videopaket für Ihr Gerätemodell, und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.

Entpacken Sie diese Datei mit den Software-Tools [7Zip 32Bit](#) oder [7Zip 64Bit](#) direkt in das Hauptverzeichnis Ihres USB-Sticks.

Kurze Anleitung zum Erstellen des Upload-USB-Sticks:

1. Stecken Sie einen leeren USB-Stick ein. Dieser wird als Wechseldatenträger (z.B. „F:“) angezeigt.
2. Entpacken Sie diese Datei mit 7zip direkt in das Hauptverzeichnis Ihres USB-Sticks. Sie erhalten eine Datei mit der Endung .sh und einen Ordner mit der Nummer Ihres Gerätemodells (12 oder 16).
3. Stecken Sie diesen USB-Stick in das eingeschaltete Plusoptix-Gerät. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Upload bestätigt ist.
4. Entfernen Sie den USB-Stick. Die Videos sind jetzt auf Ihrem Gerät verfügbar.

