

Vision Screener



reddot award 2014
winner



Guía breve 7

**“Exportar copias de seguridad e informes
(solo plusoptiX S12C y S16)”**

Plusoptix GmbH
Nordostpark 21
90411 Nuremberg
Alemania
www.plusoptix.com

Índice

1	Exportar copias de seguridad e informes.....	3
---	--	---

Lista de figuras

Figure 1: Data export.....	3
----------------------------	---



Este manual es una guía breve suplementaria. Para informaciones generales sobre su equipo Plusoptix, tales como su uso previsto, manejo básico, información técnica, mantenimiento, servicio e información de garantía, consulte el manual de usuario que se suministró con su equipo. Ese manual de usuario también se puede descargar en nuestra página de internet www.plusoptix.com, bajo Soporte.

Lista de las otras guías breves suplementarias

1. Ajustar configuración y configurar WLAN
2. Preparar y llevar a cabo una medición
3. Ver los resultados de medición
4. Introducir, extraer o borrar datos de pacientes
5. Documentar resultados de medición electrónicamente
6. Documentar resultados de medición en papel
7. Exportar copias de seguridad e informes (solo plusoptiX S12C y S16)
8. Descargar actualizaciones de software
9. Solución de problemas en el caso de averías e interrupciones de medición

1 Exportar copias de seguridad e informes

En los modelos plusoptiX S12C y S16, todos los datos de paciente y valores de medición se archivan en una base de datos en la memoria interna del Vision Screener Plusoptix. A los efectos de seguridad es posible guardar copias de seguridad de esta base de datos, y las tablas CSV se pueden guardar con fines de evaluación e información.



Nota:

Para evitar una pérdida de datos recomendamos realizar regularmente una copia de seguridad.

Apriete el botón (1) en la configuración. Seleccione el formato de archivo que desea para la exportación de datos:

	<p>Las tablas CSV se pueden editar con todos los programas convencionales de hojas de cálculo.</p>
	<p>Los archivos DB están concebidos como copias de seguridad y se los puede usar para restaurar la base de datos. Para restaurar la base de datos conecte el dispositivo de almacenamiento USB, con el archivo db exportado en su directorio "db", al equipo Plusoptix. Se le preguntará si se debe restaurar la base de datos guardada. Si en el directorio principal de la tarjeta SD hay varias bases de datos, se restaurará la más actualizada (por fecha de guardado).</p>



Nota:

Cuando usted restaure una base de datos, se guardará en primer lugar una copia de seguridad de la base de datos interna en la memoria USB. Luego, la base de datos interna será sobrescrita por la base de datos restauradora. Las dos bases de datos no se mezclarán.

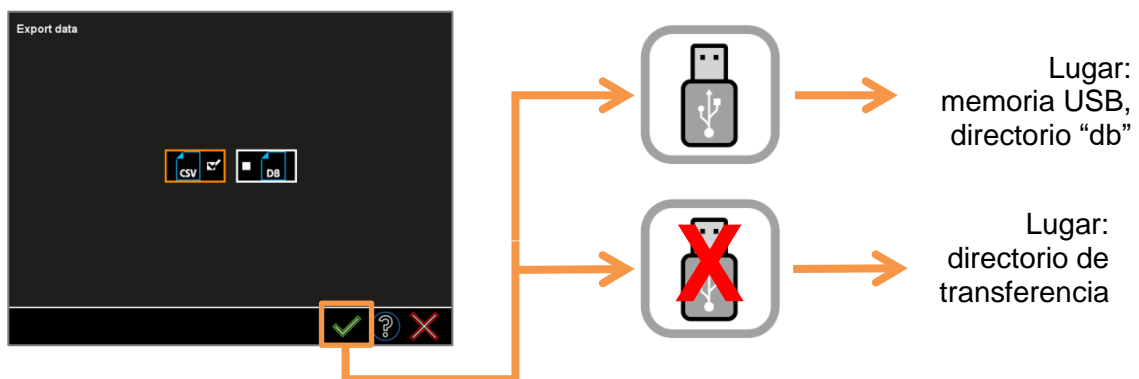


Figura 1: Exportación de datos

Si está conectada una memoria USB, se guardará una copia de seguridad en la memoria USB en el formato seleccionado. Si no está conectada una memoria USB, se guardará una copia de seguridad en el formato seleccionado en un directorio de transferencia. A este se puede llegar por medio de la siguiente URL:

plusoptiX S12: URL:\\px12-xxxx\transfer\
 plusoptiX S16: URL:\\px16-xxxx\transfer\

El comodín “xxx” representa las últimas cuatro cifras del número de serie. Usted tendrá acceso a través del directorio de transferencia distribuido.

- 1) 