

## Vision Screener



reddot award 2014  
winner



### Guía breve 8

### “Descargar actualizaciones de software”

Plusoptix GmbH  
Nordostpark 21  
90411 Nuremberg  
Alemania  
[www.plusoptix.com](http://www.plusoptix.com)

## Índice

1	Descargar actualizaciones de software – una síntesis.....	3
2	Descargar actualizaciones de software en la computadora de puesto de trabajo .....	3
3	Descargar la actualización de software directamente al Vision Screener Plusoptix (LAN/WLAN o Mini-USB).....	4
4	Descargar la actualización de software mediante LAN/WLAN (solo plusoptiX S12C y S16) .....	5
5	Descargar la actualización de software mediante cable Mini-USB (solo plusoptiX S12C y S12R).....	6

## Lista de figuras

Figura 1:	Descargar actualizaciones de software .....	4
Figura 2:	Descargar la actualización de software mediante LAN/WLAN.....	5
Figura 3:	Actualización de software mediante cable Mini-USB .....	6



Este manual es una guía breve suplementaria. Para informaciones generales sobre su equipo Plusoptix, tales como su uso previsto, manejo básico, información técnica, mantenimiento, servicio e información de garantía, consulte el manual de usuario que se suministró con su equipo. Ese manual de usuario también se puede descargar en nuestra página de internet [www.plusoptix.com](http://www.plusoptix.com), bajo Soporte.

## Lista de las otras guías breves suplementarias

1. Ajustar configuración y configurar WLAN
2. Preparar y llevar a cabo una medición
3. Ver los resultados de medición
4. Introducir, extraer o borrar datos de pacientes
5. Documentar resultados de medición electrónicamente
6. Documentar resultados de medición en papel
7. Exportar copias de seguridad e informes (solo plusoptiX S12C y S16)
8. Descargar actualizaciones de software
9. Solución de problemas en el caso de averías e interrupciones de medición

## 1 Descargar actualizaciones de software – una síntesis

Recomendamos verificar regularmente para ver si existe una nueva versión de software para descargar. Si su Vision Screener Plusoptix ya está actualizado, se mostrará el aviso “La versión de software está actualizada”. Para descargar una actualización de software, usted necesitará una tarjeta SD (plusoptiX 12) o una memoria USB (plusoptiX 16) vacías.

Usted tiene las siguientes opciones para descargar la versión de software más actual:

- Descargar actualizaciones de software en la computadora de puesto de trabajo (ver el capítulo 2)
- Descargar la actualización de software directamente al Vision Screener Plusoptix (LAN/WLAN o Mini-USB) (ver el Capítulo 3)
- Descargar la actualización de software directamente al Vision Screener Plusoptix (LAN/WLAN o Mini-USB) (ver el Capítulo 4)
- Descargar la actualización de software mediante cable Mini-USB (solo plusoptiX S12C y S12R) (ver el Capítulo 5)



### **Atención:**

Durante el proceso de actualización, todos los datos guardados en la tarjeta SD o la memoria USB serán borrados. Por este motivo, asegúrese de que usa solamente un medio de almacenamiento vacío.



### **Nota:**

Después de haber instalado la actualización de software, usted verá un aviso sobre formateado de la tarjeta SD o la memoria USB. Confirme ese aviso si desea usar la tarjeta SD o la memoria USB para guardar informes de screening después de la actualización. No la formatee si desea usarla para actualizar más Vision Screener Plusoptix.

## 2 Descargar actualizaciones de software en la computadora de puesto de trabajo

Si no puede establecer una conexión de Internet al Vision Screener Plusoptix, la actualización de software también se puede descargar a la computadora de puesto de trabajo.

La última actualización de software y las instrucciones para actualizar el software pueden encontrarse en nuestra página de internet [www.plusoptix.com](http://www.plusoptix.com).

## 3 Descargar la actualización de software directamente al Vision Screener Plusoptix (LAN/WLAN o Mini-USB)

Si desea descargar la actualización de software usando LAN/WLAN o Mini-USB, tome las siguientes medidas de precaución para actualizar el software:

- Inserte una tarjeta SD (plusoptiX 12) o una memoria USB (plusoptiX 16) vacías.
- Conecte el equipo Plusoptix a la red eléctrica.
- Establezca un acceso a Internet (mediante una conexión LAN/WLAN o mediante un cable Mini-USB a su computadora de puesto de trabajo)

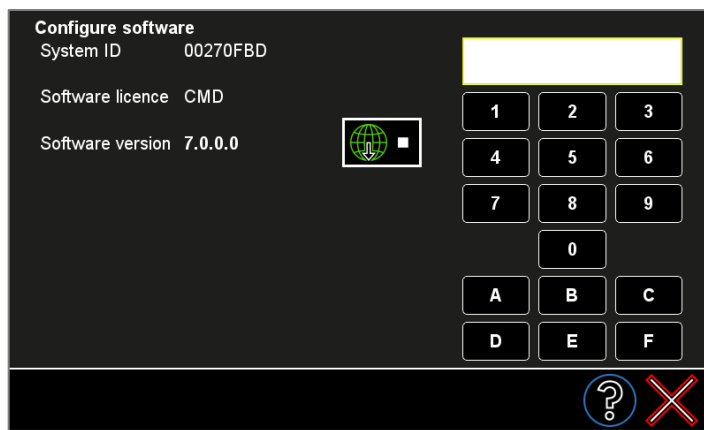


Figura 1: Descargar actualizaciones de software

- Toque el botón para configurar el software (1) en la configuración.
- Luego toque el botón (2) para descargar el software más actual.
- Confirme con la marca verde (3). Usted será guiado a través de la descarga (ver la Figura 2).

Al descargar, la actualización de software se guardará en la tarjeta SD o la memoria USB, y se visualizará una confirmación. Tan pronto como usted toca OK, el Vision Screener Plusoptix se reiniciará automáticamente e instalará la actualización de software guardada en la tarjeta SD o la memoria USB.



## 4 Descargar la actualización de software mediante LAN/WLAN (solo plusoptiX S12C y S16)

Con una conexión WLAN activa en el modelo plusoptiX S12C o una conexión LAN o WLAN activa en el modelo plusoptiX 16, usted será guiado a través de la actualización con la ayuda de los siguientes avisos de estado (ver la Figura 2).



**Nota:**

Dependiendo de la intensidad de señal de la conexión LAN/WLAN y de Internet, una actualización de software puede tomar aproximadamente 30-40 min.



**Nota:**

Dependiendo del equipo, usted necesitará una tarjeta SD vacía (plusoptiX 12) o una memoria USB vacía (plusoptiX 16). Los siguientes avisos de estado son los mismos para el modelo plusoptiX S12C y el S16, y solo difieren en el medio de almacenamiento.

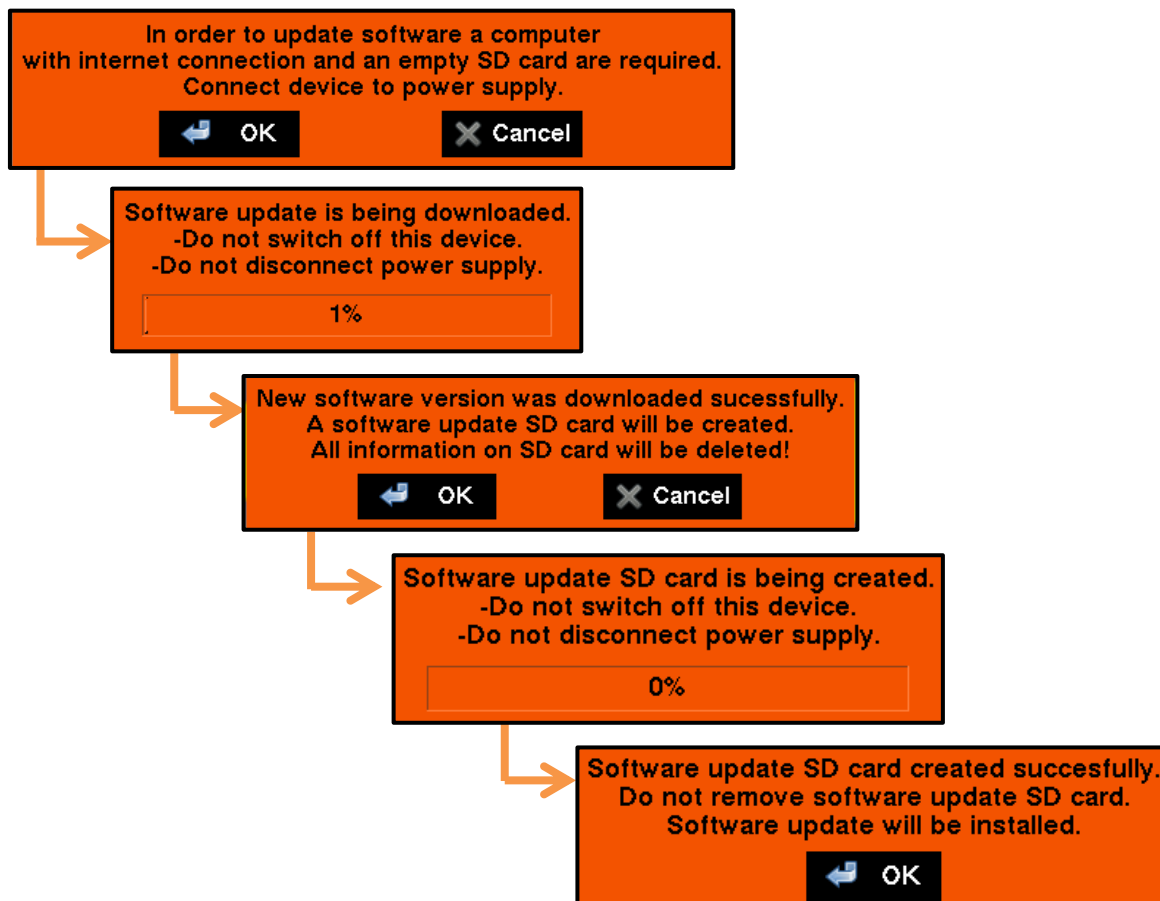


Figura 2: Descargar la actualización de software mediante LAN/WLAN

## 5 Descargar la actualización de software mediante cable Mini-USB (solo plusoptiX S12C y S12R)

Si no hay ninguna conexión WLAN disponible, la actualización de software se puede descargar mediante cable Mini-USB (ver la Figura 3).



**Nota:**

Dependiendo de la conexión de Internet, una actualización de software mediante cable Mini-USB puede tomar aproximadamente 15-25 min.

Recomendaciones de acción en el equipo

Recomendaciones de acción en su computadora

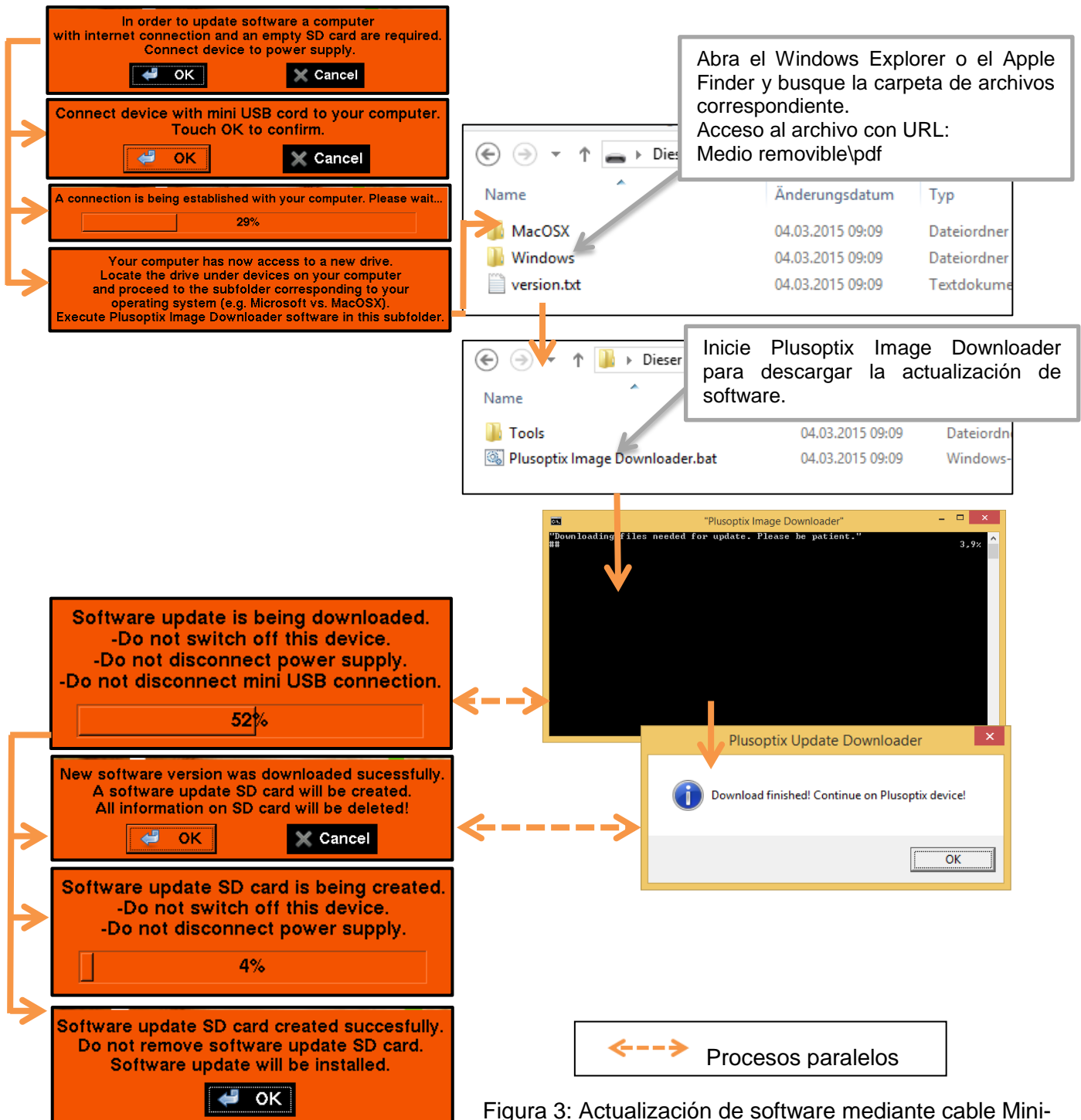


Figura 3: Actualización de software mediante cable Mini-USB