


## plusoptiXconnect

### Descrizione

plusoptiXconnect è un driver di stampa universale per i PC Windows. Con questo software si possono stampare in formato PDF, direttamente da ogni stampante collegata al vostro computer, i protocolli di misurazione e di screening ottenuti da dispositivi Plusoptix. L'accesso a questi documenti, che sono stati memorizzati su unità di memoria esterne (16:USB ; 12C:scheda SD), avviene tramite la rete informatica.

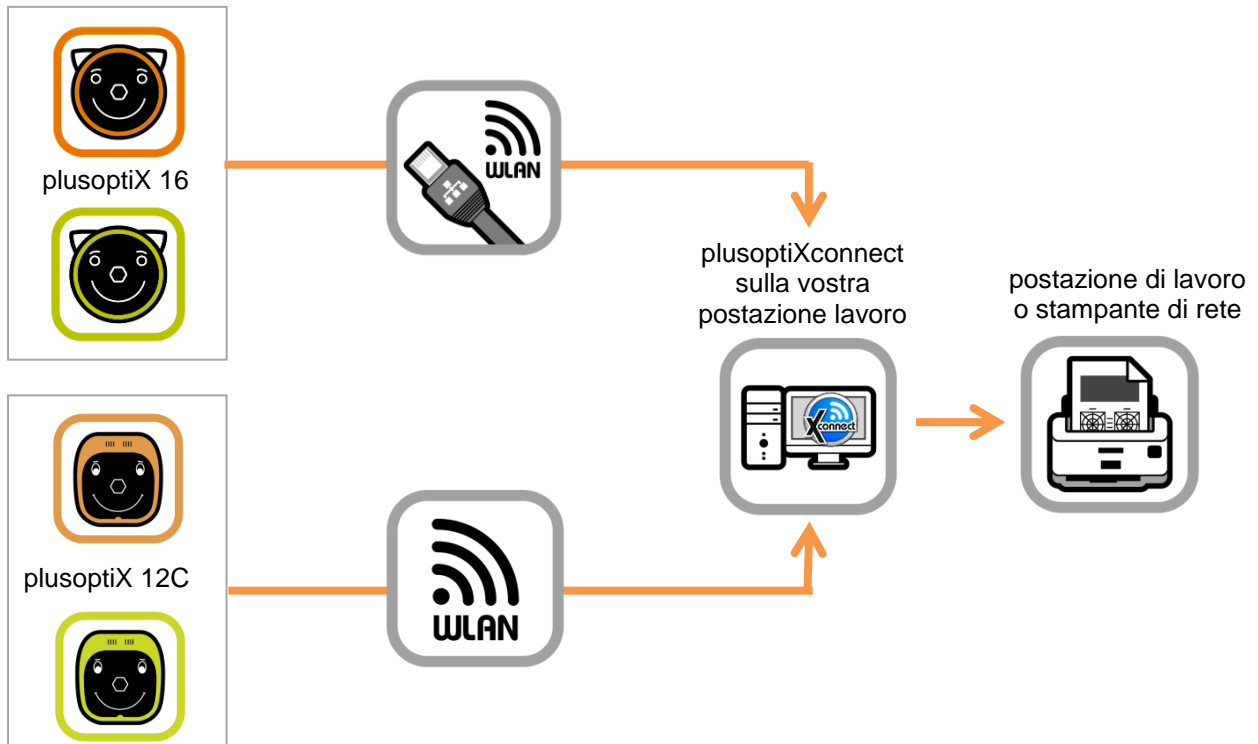


### Requisiti

- ✗ plusoptiX 16" o "plusoptiX 12C" con memoria USB / SD connessa
- ✗ Server DHCP per l'assegnazione automatica di indirizzi IP
- ✗ Collegamento di rete tra il dispositivo Plusoptix e il Vostro PC Windows
- ✗ Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 o 10
- ✗ Una postazione di lavoro o una stampante di rete collegata con il Vostro PC Windows

### Installazione

plusoptiXconnect può essere scaricato dalla sezione Supporto del nostro sito web, alla pagina [www.plusoptix.com](http://www.plusoptix.com). Avviare il software, seguire tutte le istruzioni per l'installazione e confermare tutte le impostazioni.

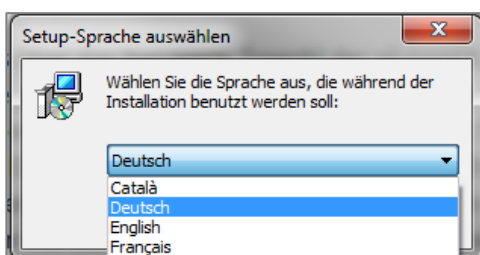

#### Nota :

Al terzo messaggio di installazione, si può selezionare la lingua scelta. Confermare la propria scelta cliccando sul pulsante "OK".

Figura 1: Selezione della lingua

Durante l'installazione di plusoptiXconnect, i programmi esterni "Ghostscript" e "GhostView" vengono installati automaticamente. Questi sono requisiti essenziali per l'utilizzazione di plusoptiXconnect. Cliccare di nuovo attraverso i passi successivi di installazione fino a quando viene visualizzato il messaggio "Installazione riuscita". L'installazione di plusoptiXconnect è ora completata.

Per disinstallare plusoptiXconnect, deve essere avviato il file "Uninstall" memorizzato nella cartella del programma. Confermare poi la rimozione di tutti i componenti associati.

I programmi esterni "Ghostscrip" e "GhostView" devono essere disinstallati separatamente.

## Utilizzazione

Avviare plusoptiXconnect. Se è attiva una connessione di rete con il dispositivo Plusoptix, il software cercherà tutti i file PDF memorizzati sui supporti di memorizzazione esterni.

Solo S12C e S16:

Il sistema memorizza anche il risultato dello screening nel nome del file. A seconda del risultato del test, il file PDF viene visualizzato in verde ("normale"), rosso ("sospetto") o giallo (misurazione incompleta). Non appena il software rileva un risultato di screening nel nome del file, viene attivata la funzione di filtro (vedere "Selezione dei file PDF per la stampa (solo per apparecchi di screening della vista plusoptiX S12C e plusoptiX S16)").



**Nota:** Se nessun file PDF è stato ancora salvato sul supporto di memorizzazione esterno, la funzione di filtro non è attivata. In questo caso, prima di effettuare la misurazione premete il pulsante di esecuzione del vostro dispositivo di screening e annullate la misurazione toccando lo schermo. Il software rileva quindi il risultato del test contenuto nel nome del file e la funzione di filtro viene nuovamente visualizzata.

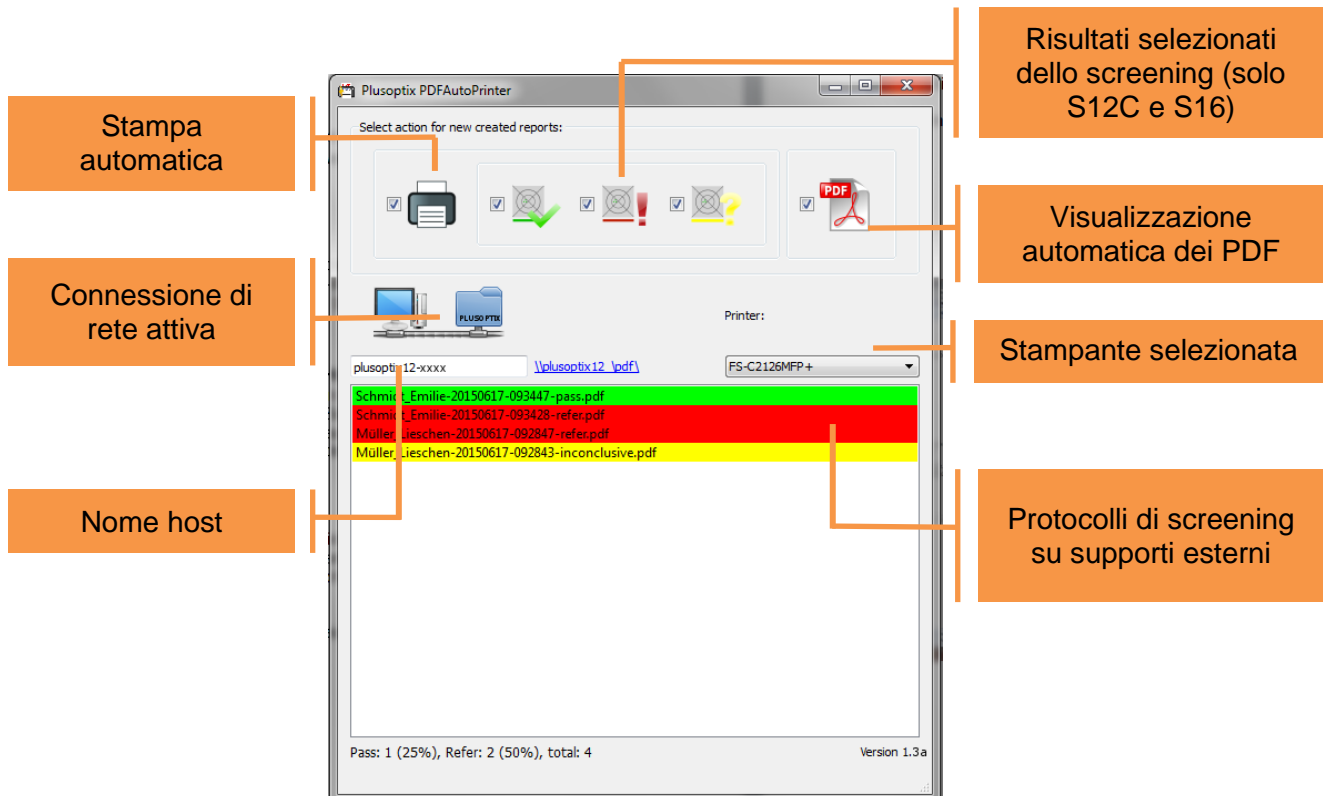


Figura 2 : interfaccia utente plusoptiXconnect con funzione di filtro

## Stabilire la connessione:

Ogni dispositivo Plusoptix ha un cosiddetto nome di host. Inserite il nome dell'host del vostro dispositivo nella riga indicata (1). Il software cercherà poi continuamente nuovi file PDF salvati su dispositivi con questo nome host.

plusoptiX 16 : Il nome host è « px16-xxxx ». Il nome dell'host non può essere inserito manualmente.

plusoptiX 12C : dalla versione software 6.1.11.0, le ultime quattro cifre del numero di serie sono incluse nel nome dell'host: "plusoptiX12-xxxx". Dalla versione software 6.1.12.0, il nome dell'host è stato abbreviato in "px12-xxxx". Il nome dell'host non può essere cambiato manualmente.



### **Nota :**

Se il software non rileva un supporto di memorizzazione esterno con il nome host specificato, la connessione inattiva è indicata da una X rossa (2). In questo caso, controllate il nome dell'host. Se il nome dell'host è corretto e tuttavia la X rossa (2) è ancora visualizzata, controllate la vostra connessione di rete o la connessione di un supporto di memorizzazione esterno.

## Elaborazione automatica dei file PDF ricevuti

Dopo aver completato una misurazione, un protocollo di misurazione /screening viene memorizzato sul supporto di memoria esterno del dispositivo Plusoptix.



### **Nota:**

Se un test viene eseguito in modo anonimo, il test/protocollo di screening deve essere registrato manualmente. Si prega di leggere le istruzioni per l'uso del dispositivo Plusoptix.

plusoptiXconnect riceve il protocollo di misurazione / screening come documento PDF e può quindi:

- X stamparlo automaticamente su una stampante collegata alla stazione di lavoro. Per farlo, attivare la casella di controllo corrispondente (3). La stampante può essere selezionata nel campo (4).
- X visualizzarlo automaticamente come un file PDF sul desktop del PC (5).

## Selezionare i file PDF per la stampa (solo per i dispositivi di screening plusoptiX S12C e plusoptiX S16)

Per stampare solo i rapporti di screening con un determinato risultato, i rapporti di misurazione su S12 e S16 possono essere selezionati individualmente per risultato di screening. Per farlo, attivate o disattivate la casella di controllo del simbolo corrispondente:

- X Protocolli di screening con risultato di screening "superato" (6)
- X Protocolli di screening con risultato "consulta" (7)
- X Protocolli di screening per una misurazione incompleta (8)

