


plusoptiXconnect

1 Descripción

plusoptiXconnect es un driver universal para impresoras para computadoras Windows. Con este software pueden imprimirse informes de medición / informes de screening (documentos PDF) producidos por equipos Plusoptix. Esta impresión se puede realizar con cualquier impresora conectada a su computadora. El acceso a los documentos PDF que se guardaron en el medio de almacenamiento externo (16: USB, 12C: tarjeta SD) es posible a través de la red de computadoras

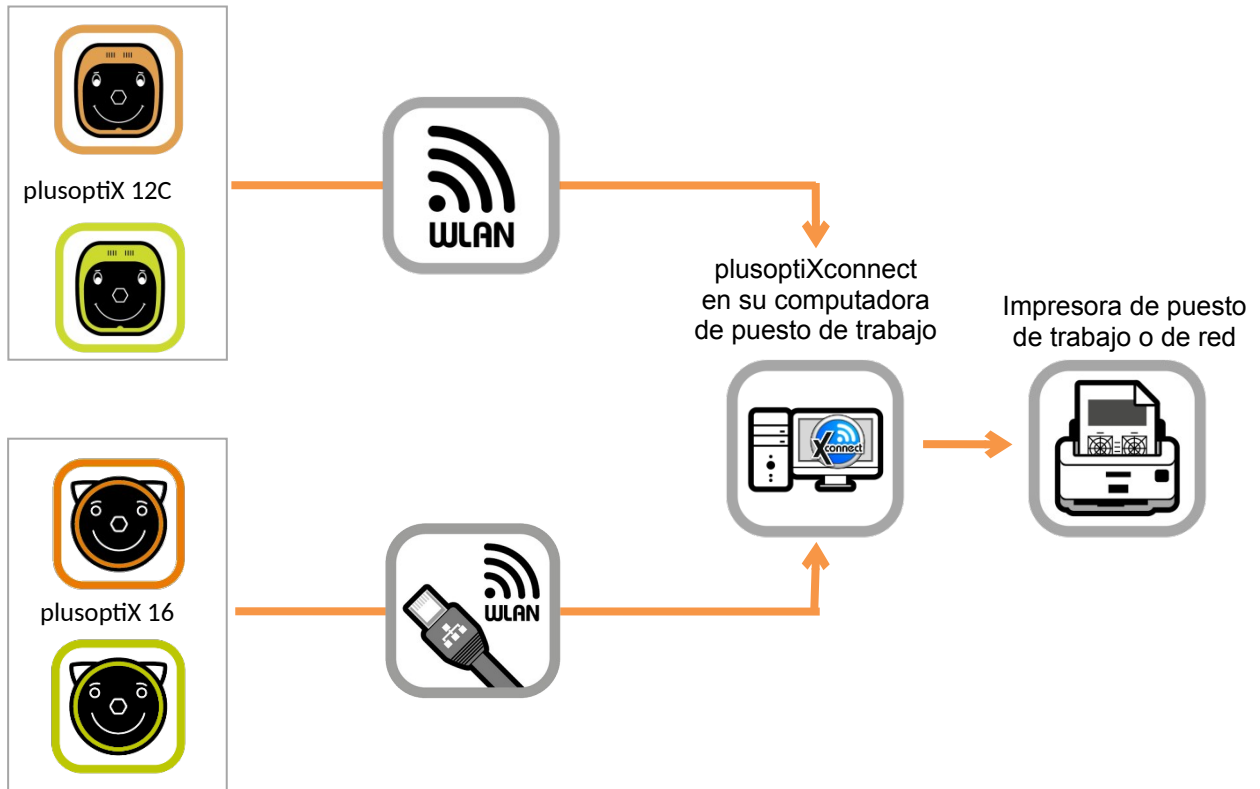


2 Requisitos

- ✗ “plusoptiX 16” o “plusoptiX 12C” con memoria USB / SD conectada
- ✗ Servidor DHCP para asignación automática de direcciones IP
- ✗ Conexión de red entre el equipo Plusoptix y su computadora Windows
- ✗ Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 o 10
- ✗ Una impresora de puesto de trabajo o de red conectada a su computadora Windows

3 Instalación

plusoptiXconnect puede descargarse de nuestro sitio web www.plusoptix.com, bajo [soporte](#). Abra el software, siga la rutina de instalación y confirme todas las configuraciones.

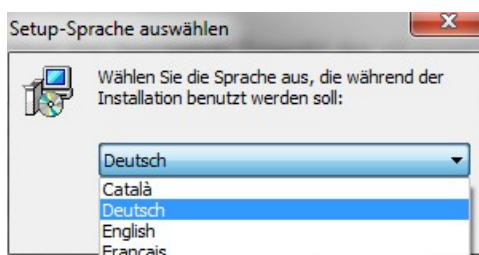

Nota:

En el tercer aviso de instalación puede seleccionar su idioma preferido. Confirme su selección con el botón “OK”.

Figura 1: Seleccionar idioma

Durante la instalación de plusoptiXconnect se instalan automáticamente los programas externos “Ghostscript” y “GhostView”. Estos son un requisito para la utilización de plusoptiXconnect.

Para desinstalar plusoptiXconnect debe iniciarse el archivo “Uninstall” que está guardado en la carpeta del programa. Confirme el aviso para borrar todos los componentes correspondientes.

4 Utilización

Inicie plusoptiXconnect. Si existe una conexión de red activa al equipo Plusoptix, el software realiza la búsqueda de todos los archivos PDF guardados en la memoria externa.

Solo S12C y S16:

En el S12C y el S16 se guarda además el resultado de screening en el nombre del archivo. Dependiendo del resultado de screening, el archivo PDF se presenta ahora en verde (“pasar”), rojo (“remitir”) o amarillo (Medición incompleta). Tan pronto como el software detecta un resultado de screening en el nombre del archivo se activa la función de filtro (ver “Seleccionar archivos PDF para la impresión (solo Vision Screener plusoptiX S12C y plusoptiX S16)”).



Nota:

Si todavía no hay ficheros PDF guardados en la memoria externa, entonces la función de filtro no está activada. Oprima en ese caso el disparador de su Vision Screener antes de la primera medición e interrumpa la medición por medio de toque de la pantalla. El software detecta entonces el resultado de screening incluido en el nombre del archivo y se muestra la función de filtro.

The screenshot shows the plusoptiXconnect application window. It features a top navigation bar with icons for device status, WLAN, and a printer. Below this is a list of recognized devices with checkboxes and color-coded status indicators (green, red, yellow). A file selection area shows a folder path and a list of PDF files. The bottom section includes printer selection (HP-LaserJet 9000), a copy count field (set to 1), and checkboxes for automatic printing, PDF display, and file management. A progress bar at the bottom indicates the screening status: Pass: 2 (18%), Refer: 8 (73%), total: 11. The version number 1.7 is also visible.

| | |
|--|------------------------------------|
| dispositivo reconocido: verde: A12C naranja: S12C | estado de la conexión (2) |
| Nombre de host (1) px16-1234 | pasar (7) |
| recognized device: green: A16 orange: S16 | remitir (8) |
| seleccionar informes de screening (sólo S12C y S16) | medición incompleta (9) |
| Impresión automática (3) | Impresora seleccionada (10) |
| Mostrar automáticamente PDF (4) | número de copias (11) |
| mover el PDF a la carpeta carpeta seleccionada automáticamente (5) | mostrar los PDF seleccionados (12) |
| eliminar el PDF automáticamente (6) | estadística (Screener) |
| | Versión |

Figura 2: Interfaz de manejo plusoptiXconnect con función de filtro

Establecer conexión

Cada equipo Plusoptix dispone de un denominado nombre de host. Anote el nombre de host de su equipo en el renglón (1) mostrado. El software busca luego continuamente nuevos archivos PDF que están guardados en equipos con ese nombre de host.

plusoptiX 16: El nombre de host es "px16-xxxx". El nombre de host no puede adaptarse manualmente.

plusoptiX 12C: Desde la versión de software 6.1.11.0 están incluidos los últimos cuatro dígitos del número de serie en el nombre de host: "plusoptiX12-xxxx". Desde la versión de software 6.1.12.0 se acortó el nombre de host a "px12-xxxx". El nombre de host no puede adaptarse manualmente.



Nota:

Si se conecta correctamente a la red, aparece una marca de verificación verde en plusoptiXconnect (2). Si en su lugar aparece una X roja, compruebe lo siguiente:

- ✗ No hay ninguna memoria externa (unidad USB/tarjeta SD) conectada al dispositivo.
- ✗ Ha introducido un nombre de host incorrecto (1).
- ✗ El WiFi está desactivado o no hay ningún cable LAN conectado al dispositivo.
- ✗ El aparato está fuera del alcance del WIFI (plusoptiX 12C).
- ✗ El antivirus (firewall) de Windows no ha permitido el acceso al dispositivo.

Procesamiento posterior automático de archivos PDF recibidos

Después de una medición concluida se guarda un informe de medición / informe de screening en la memoria externa del equipo Plusoptix.



Nota:

Si se lleva a cabo una medición anónima, el informe de medición / informe de screening debe guardarse manualmente. Lea para ello el manual de instrucciones de su equipo Plusoptix.

Este informe de medición es recibido por plusoptiXconnect como un nuevo archivo PDF y puede entonces:

- ✗ imprimirse automáticamente en una impresora conectada con el computador del puesto de trabajo. Para ello, active la casilla correspondiente (3). La impresora se puede seleccionar individualmente con el botón (4). También puede ajustar el número de copias deseadas (11)
- ✗ mostrarse automáticamente como archivo PDF en el escritorio (5)
- ✗ mover y almacenar automáticamente una copia del PDF en la carpeta seleccionada (función de movimiento) (5)
- ✗ eliminar el PDF copiado (función de seguridad de datos) (6) - sólo en combinación con (5)



Nota:

Los ajustes no se pueden cambiar para los trabajos de impresión ya procesados.

Filtrar archivos PDF para la impresión (solo Vision Screener plusoptiX S12C y plusoptiX S16)

Para imprimir exclusivamente informes de screening con un determinado resultado de screening pueden filtrarse los informes de screening en el S12 y el S16 individualmente según el resultado de screening. Active o desactive para ello la casilla del símbolo correspondiente:

- ✗ Informes de screening con resultado de screening "pasar" (7)
- ✗ Informes de screening con resultado de screening "remitir" (8)
- ✗ Informes de screening de una medición incompleta (9)

1) px16-1234 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) PDFCreator 11) 1